



# Bruksanvisning för Stirex osthyvel

**Artikelnr: CH-SL-1**

## Säkerhet:

- Använd inte produkten på annat sätt än vad som är avsett.
- Var försiktig då hyvelkanten är vass.
- Hyvla endast mjuka eller halvhårda ostar.
- Förvara osthyveln på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn då den inte är avsedd att användas av eller i närheten av barn.
- Undvik att hyvla saker som osthyveln inte är avsedd för, exempelvis hårda föremål.
- Undvik att använda osthyveln om ni känner smärta eller obehag i samband med användandet av den.

## Användning:

Stirex osthyvlar har samma användningsområden som vanliga osthyvlar. Stirex osthyvlar är utrustade med ett ergonomiskt, vinklat handtag placerat i en vinkel som möjliggör att man kan överföra kraften från armen ner igenom en neutral handled till centrum av hyveln. Använd vår osthyvel i förebyggande syfte eller för behagligare arbetsposition vid svaghet i handleden. Hyvelbladet av knivstål är ingjutet i ett massivt handtag av miljövänlig plast.

Stirex osthyvlar är avsedda att användas för hyvling av mjuka till halvhårda ostar.

**Skötsel:** Kniven kan maskindiskas och kokas.  
Handdisk är skonsammast.

## Teknisk specifikation:

Art nr:	Benämning:	Bladlängd:	Vikt:
CH-SL-1	Stirex osthyvel	9,5 cm	98 g

## Material:

**Handtag:** PP, **Hyvelblad:** Rostfritt stål

## Symboler:



Våra produkter uppfyller kraven för CE-märkning och följer EU-direktiven 93/42/EEG samt 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

## Tillverkare:

Stirex Innovation AB  
Box 109  
191 22 Sollentuna  
Tel: 08-760 02 55  
[www.stirex.se](http://www.stirex.se)  
[info@stirex.se](mailto:info@stirex.se)