



Bruksanvisning för Stirex rostfria tänger

Artikelnr: P-91B, P-91BS, P-91BM, P-90B, P-90BS, P-90BM

Säkerhet:

- Använd inte produkten på annat sätt än vad som är avsett.
- Var försiktig då tångfronten kan vara vass.
- Förvara tången på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn då den inte är avsedd att användas av eller i närheten av barn.
- Undvik att använda tången till sådant som den inte är avsedd för.
- Undvik att använda tången om ni känner smärta eller obehag i samband med användandet av den.

Användning:

Stirex tänger har samma användningsområden som vanliga tänger. Stirex tänger är utrustade med ett fjäderband vilket ger en mjuk återfjädring som underlättar både i ett förebyggande syfte och vid svaghet i handen eller tumbasen. Fronten av rostfritt stål är ingjuten i handtag av miljövänlig plast (pp).

Stirex tänger kan användas som griphjälpsmedel på många olika vis både i hemmet och på arbetsplatsen.

Skötsel: Tången kan maskindiskas. Handdisk är skonsammast.

Teknisk specifikation:

Art nr:	Benämning:	Frontlängd:	Vikt:
P-91B	Stirex Plocktång	6,5 cm	29 g
P-91BS	Stirex Plocktång	6,5 cm	29 g
P-91BM	Stirex Plocktång	6,5 cm	39 g
P-90B	Stirex Plocktång	7 cm	27 g
P-90BS	Stirex Plocktång	7 cm	27 g
P-90BM	Stirex Plocktång	7 cm	37 g

Material:

Tångfront: Rostfritt stål, **Handtag:** PP

Symboler:



Våra produkter uppfyller kraven för CE-märkning och följer EU-direktiven 93/42/EEG samt 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkare:

Stirex Innovation AB
Box 109
191 22 Sollentuna
Tel: 08-760 02 55
www.stirex.se
info@stirex.se